



Exact maatnemen

Tips voor het opmeten van
vlakbrei compressiehulpmiddelen


Klantenservice

Juzo – Staat altijd voor u klaar

Sympathiek, vriendelijk en competent, zo beschrijven onze klanten ons. Met een glimlach op de lippen en een luisterend oor zetten wij ons voor u in. Het is ons doel om uw individuele zorgvraag te vervullen. Daarom zoeken we voortdurend naar geschikte oplossingen. Hiervoor grijpen wij terug op onze ervaring en unieke vakkennis, die wij gestaag verder ontwikkelen. Wij staan u graag te allen tijde met raad en daad terzijde. Niet alleen om aan onze eigen kwaliteitseisen te kunnen voldoen, maar ook om u te ondersteunen bij een succesvolle behandeling van uw patiënten met behulp van geschikte producten. Wij kijken uit naar een telefonisch gesprek met u en vinden gegarandeerd een oplossing. Want 'kan niet' bestaat niet bij ons!

Onze Juzo Klantenservice biedt u:

- + Algemene informatie
- + Informatie over de status van de opdracht
- + Opdrachtbevestiging
- + Individueel productadvies
- + Bevestiging van wijzigings- en reparatieopdrachten
- + Advies bij speciale vragen over compressietherapie

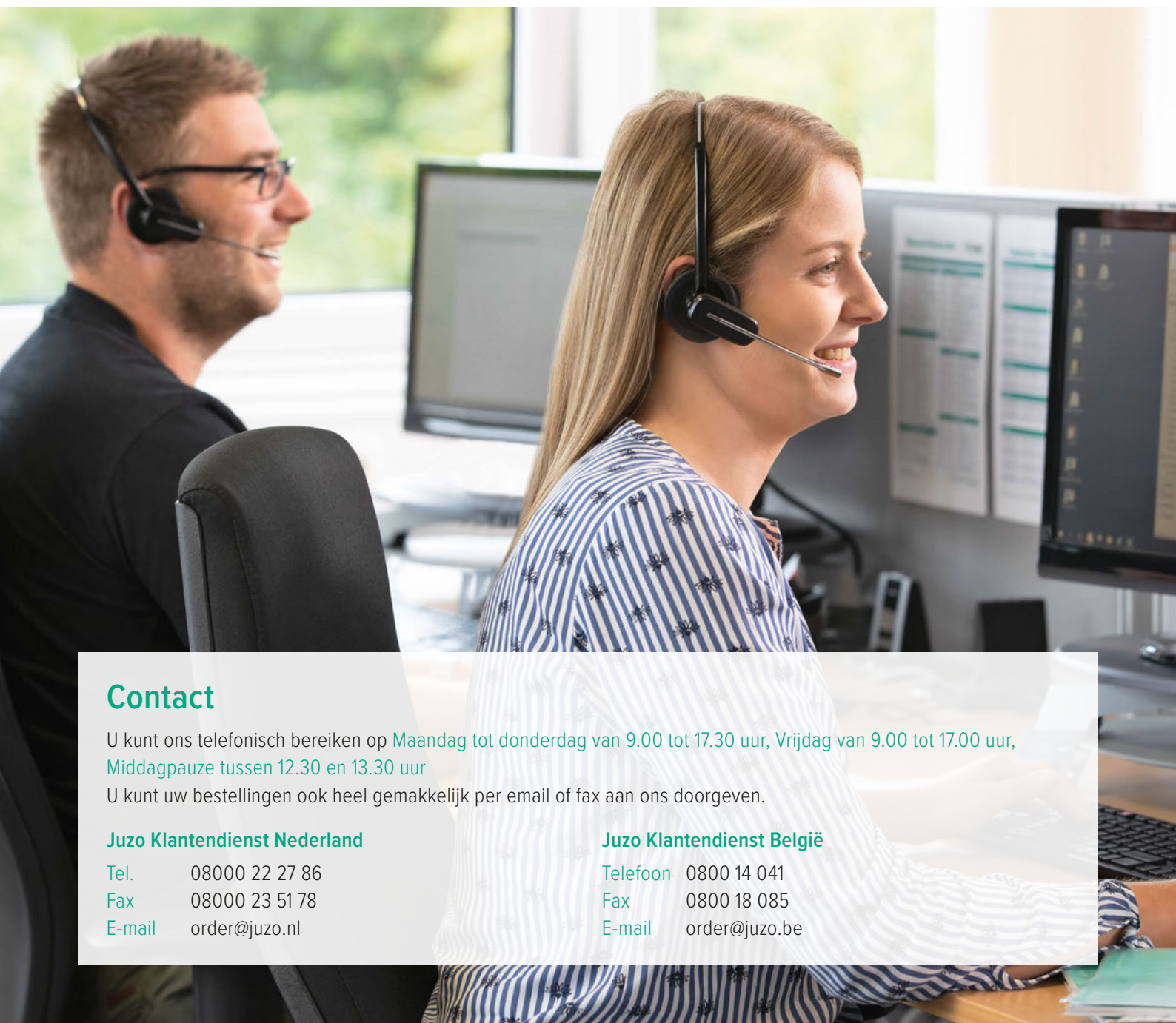

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken op **Maandag tot donderdag van 9.00 tot 17.30 uur, Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, Middagpauze tussen 12.30 en 13.30 uur**

U kunt uw bestellingen ook heel gemakkelijk per email of fax aan ons doorgeven.

Juzo Klantendienst Nederland

Tel. 08000 22 27 86
Fax 08000 23 51 78
E-mail order@juzo.nl

Juzo Klantendienst België

Telefoon 0800 14 041
Fax 0800 18 085
E-mail order@juzo.be

Aanwijzingen voor het exact maatnemen en lymfologie

Algemene aanwijzingen

Exact maatnemen en lymfologie 04

Compressie hulpmiddelen

Voet- en teenkappen 06

Kousen en panty's 08

Handschoenen 12

Armkousen 15

Thoraxbandages 18

Hoofd-hals-bandages 20

Algemene aanwijzingen

Voor het exact maatnemen van compressie hulpmiddelen



- Het aangedane gebied moet zoveel mogelijk oedeemvrij zijn. Bij voorkeur in de morgen of net na een behandeling aanmeten.
- Het markeren van de meetpunten op de huid met een kohlpotlood maakt het maatnemen eenvoudiger.
- Voor iedere omtrekmaat (circumference) moet ook de overeenkomstige lengtemaat worden gemeten. Zo kunnen zowel de juiste pasvorm als het correcte compressieverloop worden gegarandeerd.
- Voor de juiste keuze raadpleegt u onze brochure Juzo speciale verzorging lymfologie.
- Vanwege het principe van gegevensminimalisatie in het kader van de privacywet, raden wij aan om alleen bij moeilijke anatomische omstandigheden fotodocumentatie te verzenden. Stuur de foto's per e-mail naar order@juzo.nl of order@juzo.be. Indien de naam van de patiënt wordt vermeld, bevestigt het bedrijf dat de bestelling plaatst, dat de betreffende patiënt vooraf toestemming heeft gegeven voor de overdracht en verwerking van zijn of haar gegevens.

Juzo hulpmiddelen voor het meten



Rolmeetlint

· lengte: 150 cm



Desinfecteerbaar meetlint

· lengte: 200 cm



Wegwerpmeetlint om vingers te meten

· lengte: 85 cm



Vingerliniaal

· lengte: 18 cm



Kohlpotlood

· kleur: zwart

Bestelling **Offerte aanvraag**

Tel: 0800 22 21 86 Fax: 0800 22 51 76 E-mail: order@juzo.nl
 Tel: 0800 14 041 Fax: 0800 18 085 E-mail: order@juzo.be

Juzo
Lymphology

Lymfologie Aankruisen v.v.p. Foto documentatie volgt per e-mail*

Voet links **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Voet rechts **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Specifieke wensen (in handtekening)

Material	18-21 maatlij	22-24 maatlij	24-46 maatlij
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)

Maatlij
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Individuele opties
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Accessoires
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Voet- en teenkappen

Bestelling **Offerte aanvraag**

Tel: 0800 22 21 86 Fax: 0800 22 51 76 E-mail: order@juzo.nl
 Tel: 0800 14 041 Fax: 0800 18 085 E-mail: order@juzo.be

Juzo
Lymphology

Lymfologie Aankruisen v.v.p. Foto documentatie volgt per e-mail*

Been links **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Been rechts **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Specifieke wensen (in handtekening)

Material	18-21 maatlij	22-24 maatlij	24-46 maatlij
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)

Maatlij
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Individuele opties
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Accessoires
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Kousen en panty's

Bestelling **Offerte aanvraag**

Tel: 0800 22 21 86 Fax: 0800 22 51 76 E-mail: order@juzo.nl
 Tel: 0800 14 041 Fax: 0800 18 085 E-mail: order@juzo.be

Juzo
Lymphology

Lymfologie Aankruisen v.v.p. Foto documentatie volgt per e-mail*

Hand links **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Hand rechts **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Specifieke wensen (in handtekening)

Material	18-21 maatlij	22-24 maatlij	24-46 maatlij
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)

Maatlij
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Individuele opties
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Accessoires
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Handschoenen

Bestelling **Offerte aanvraag**

Tel: 0800 22 21 86 Fax: 0800 22 51 76 E-mail: order@juzo.nl
 Tel: 0800 14 041 Fax: 0800 18 085 E-mail: order@juzo.be

Juzo
Lymphology

Lymfologie Aankruisen v.v.p. Foto documentatie volgt per e-mail*

Arm links **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Arm rechts **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Specifieke wensen (in handtekening)

Material	18-21 maatlij	22-24 maatlij	24-46 maatlij
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)

Maatlij
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Individuele opties
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Accessoires
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Armkousen

Bestelling **Offerte aanvraag**

Tel: 0800 22 21 86 Fax: 0800 22 51 76 E-mail: order@juzo.nl
 Tel: 0800 14 041 Fax: 0800 18 085 E-mail: order@juzo.be

Juzo
Lymphology

Lymfologie Aankruisen v.v.p. Foto documentatie volgt per e-mail*

Links **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Rechts **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Specifieke wensen (in handtekening)

Material	18-21 maatlij	22-24 maatlij	24-46 maatlij
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)

Maatlij
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Individuele opties
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Accessoires
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Thoraxbandages

Bestelling **Offerte aanvraag**

Tel: 0800 22 21 86 Fax: 0800 22 51 76 E-mail: order@juzo.nl
 Tel: 0800 14 041 Fax: 0800 18 085 E-mail: order@juzo.be

Juzo
Lymphology

Lymfologie Aankruisen v.v.p. Foto documentatie volgt per e-mail*

Hoofd links **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Hoofd rechts **Overname (S) en lengte (P) in cm**

Specifieke wensen (in handtekening)

Material	18-21 maatlij	22-24 maatlij	24-46 maatlij
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)
Lees E-Soft	(0.302)	(0.302)	(0.302)

Maatlij
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Individuele opties
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Accessoires
 18-21 maatlij 22-24 maatlij 24-46 maatlij

Hoofd-hals-bandages

Alle maatformulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij onze klantenservice. Alle maatformulieren vindt u als download op onze website www.juzo.nl of www.juzo.be.

Compressie hulpmiddelen

Voet- en teenkappen



Algemene aanwijzingen

- De maten "cA" resp. "cA'" moeten in staande positie worden gemeten. Als de voet-/teenkap, s' nachts wordt gedragen, dan moeten de maten "cA" resp. "cA'" liggend worden gemeten.
- Bij de zeer kleine teenmaten moet u de maten **afgerond op de millimeter opgeven**. Hiervoor kunt u het Juzo vingermeetlint gebruiken.
- Wordt de teenkap samen gedragen met een kous, dan moet de kous en de teenkap minstens 6 cm overlappen.

Omtrekmaten

- Omtrekmaten altijd circulair en recht rondom de voet of de tenen meten. Niet in de huidplooiën meten.
- Bij restoedeem mogelijk onder spanning meten. (In geval van oedeem op de voet raden wij u aan om los te meten.)



Omtrek "cA"

Ter hoogte van de inplant van de kleine teen (ook bij hallux valgus)



Omtrek "cA1"



Bij volwassenen 6 cm vanaf de inplant van de kleine teen



Omtrek "cX"


Omtrek grote teen aan de basis meten

Bij een teen is omvangsmaat "cX" is niet kleiner dan "cZ"

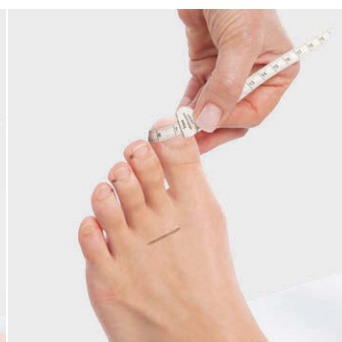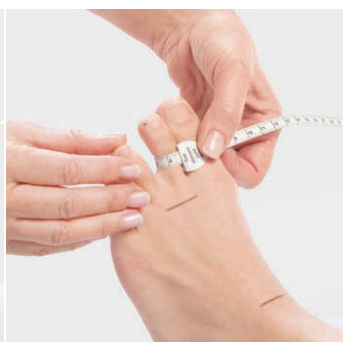

Omtrek "cZ"

Omtrek einde bandage meten op het gewenste eindpunt

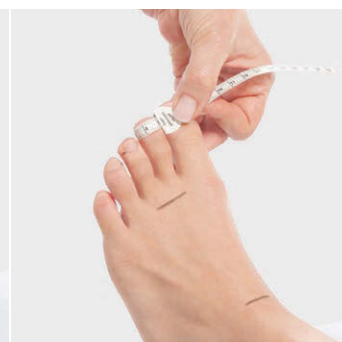

Lengtematen

- De teenaanzetten moeten minstens 1 cm zijn. Om een optimale pasvorm te krijgen, de lengte van de teenaanzetten meten tot aan de nagelriem.
- De teenlengtes vanaf "cX" tot aan het gewenste einde meten. Hierbij houdt u het meetkaartje tussen de tenen tot waar de teen begint.



Lengte "pAA1"

Bij volwassenen minstens 6 cm
Basis: metatarsale V, op het midden van de voetrug gemeten



Lengte "pXZ"

Teenlengte meten: tussen de tenen te meten aan de korte zijde (tot minstens halverwege de nagel)



Compressie hulpmiddelen

Kousen en panty's



Algemene aanwijzingen

- De lengtemaat altijd in een rechte hoek ten opzichte van de lengte-as (loodrecht) meten!
- Het beste is om de patiënt in staande positie te meten, als dit mogelijk is.
- Om een optimale drukverloop en een betere anatomische pasvorm te krijgen, kunt u een schuine afwerkingen bestellen.
- Wordt de teenkap samen gedragen met een kous, dan moet de kous en de teenkap minstens 6 cm overlappen.

Omtrekmaten

- Omtrekmaten altijd circulair en recht rondom het been meten. Niet in de huidplooien meten.
- Bij restoedeem eventueel onder spanning meten.
- Indien mogelijk, omtrek "cA" en de bovenbeenafmetingen in staande positie meten.



Omtrek "cA"

Ter hoogte van de inplant van de kleine teen (staande positie)



Omtrek "cY"

Vanaf de punt van de hiel tot bovenop de enkel in maximale dorsaalflexie



Omtrek "cB"

Direct boven de enkel (lengte voetgedeelte meten tot 1 cm vanaf de "cY" wreef)



Omtrek "cB1"

Meten bij de overgang van de achillespees naar de kuitspier



Omtrek "cC"

Dikste gedeelte van de kuit



Omtrek "cD"

Ter hoogte van het kopje van het kuitbeen



Omtrek "cE"

Door de knieplooi gemeten. Advies bij ernstig oedeem bij eenlicht ebogen knie ca 2 centimeter boven de patellabovenrand meten




Omtrek "cF"

Midden bovenbeen




Omtrek "cG"

Aan het dikste gedeelte van het bovenbeen onder de plooi van het zitvlak

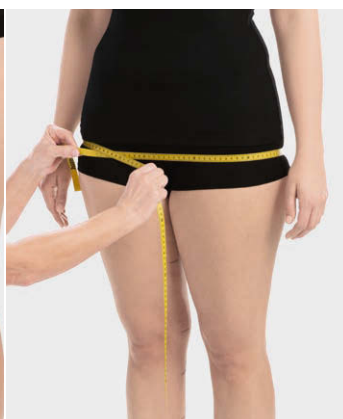


Omtrek "cK"

Tot aan schaambeem

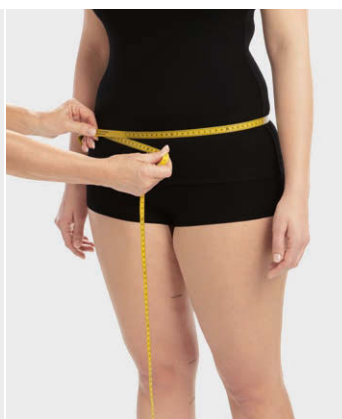

Omtrek "cH"

Grootste omvang buik

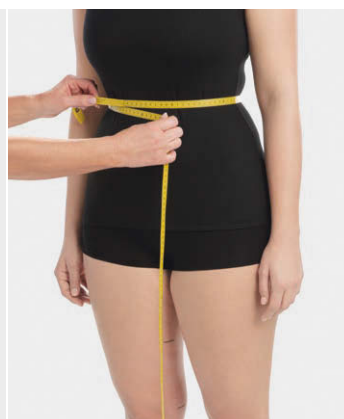


Omtrek "cT"

In de taille of de gewenste hoogte van het broekgedeelte

Lengtematen

- Lengtematen loodrecht aan de binnenkant van de voet of het been meten.
- “PF” en “PG” en de maten van het broekgedeelte moeten in staande positie worden gemeten. Alle andere beenlengtes kunt u meten in een zittende positie.

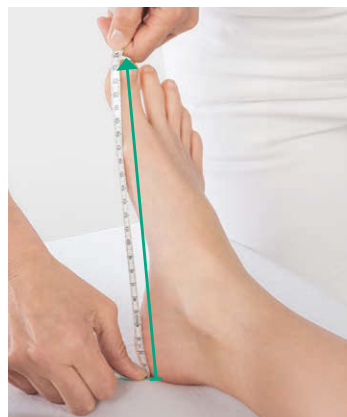

Totale voetlengte “PZ”

Alleen bij een gesloten teen: de rug van de hiel tot aan de langste punt van de tenen (staande positie)



Voetlengte “PA”

Vanaf de hiel tot aan de inplant van de kleine teen (1)
Bij een schuine voet: Meet de lengte aan de buitenen binnenkant van de voet (2)



Lengte “PB”

Vanaf de voetzool tot boven de enkel aan de mediale zijde



Lengte “PB”

Vanaf de hiel tot daar waar de achillespees overgaat in de kuitspier




Lengte “PC”

Vanaf de hiel tot aan het dikste gedeelte van de kuit




Lengte “PD”

Vanaf de hiel tot aan het kopje van het kuitbeen (tuberositas tibiae) (1)
Controle: lengtemaat “PD” bij AD-kousen al zittend nog eens extra controleren (2)

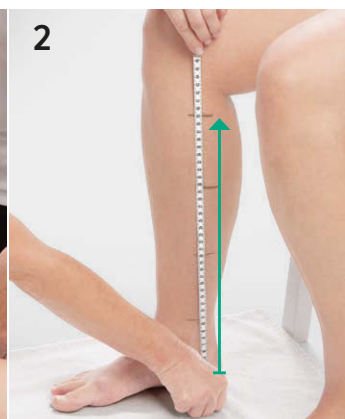

Lengte “PE”

Vanaf de hiel tot het midden van de patella (1)
Bij een anatomische knie: tot in de knieholte (knieplooi) meten (2)

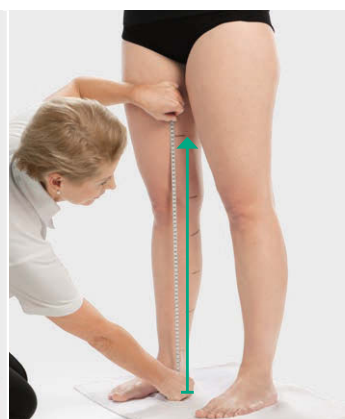


Lengte “PF”

Vanaf de hiel tot het midden van het bovenbeen




Lengte "PG"

Bij AG-kousen:
vanaf de voetzool tot 2 vingers
onder de bilplooi

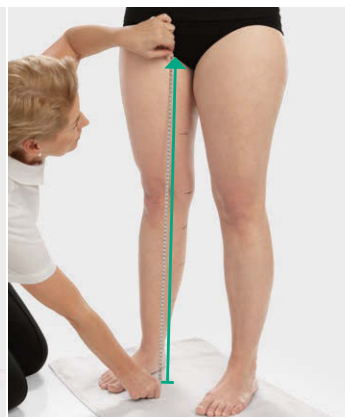


Lengte "PG"

Voor broeken:
vanaf de hiel tot aan het kruis

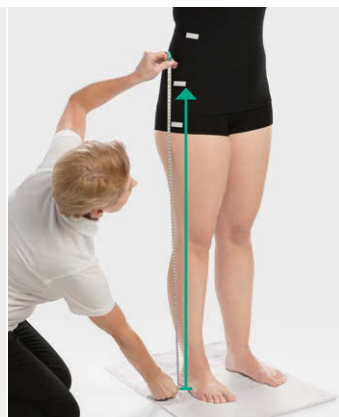

Lengte "PH"

Vanaf de hiel tot aan het breedste
gedeelte van het bekken

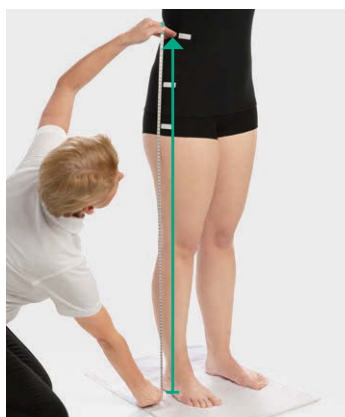


Lengte "PT"

Vanaf de hiel tot aan de taille of de
gewenste hoogte van het broek-
gedeelte



Lengte "PKT voor"

Hoogte achter: vanaf de bilplooi
tot aan de gewenste hoogte van
de broek

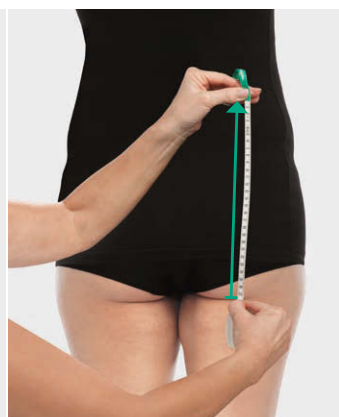

Lengte "PKT achter"

Hoogte voor: van kruis tot aan de
gewenste hoogte van de broek

Om afzakken te voorkomen moet het broekgedeelte tot boven de bekkenkam of tot aan het midden van de taille komen. Daarom bij een grote omvang graag niet te strak meten. Lengte graag loodrecht meten.

Let op: bei grote omvangen niet te kort meten. In geval van los bindweefsel, wordt de lengte gemeten door het meetlint op spanning te meten.

Compressie hulpmiddelen

Handschoenen



Algemene aanwijzingen

- De lengtemaat altijd in een rechte hoek ten opzichte van de lengte-as (loodrecht) meten!
- Bij de zeer kleine vingermaten moet u de maten **afgerond op de millimeter** opgeven. Hiervoor kunt u het Juzo vingerveetlint gebruiken.
- Bij een handschoen met een verlengde armaanzet kunt u het beste een schuine afwerking kiezen. Zo ontstaat er een optimaal drukverloop en een betere pasvorm.
- Wordt de handschoen in combinatie gedragen met een armbandage dan moeten deze minstens 6 cm overlappen.

Omtrekmaten

- Omtrekmaten altijd circulair en recht rondom de hand of de vingers meten. Niet in de huidplooiën meten.
- Bij restoedeem eventueel onder spanning meten.



Omtrek "cA"

Ter hoogte van het basisgewricht van de pink (de hand moet plat op bijv. een tafel liggen)



Omtrek "cB"

Ter hoogte van de duimhoek (de hand moet plat op bijv. een tafel liggen)



Omtrek "cC"

Distaal van het kopje van de ulna



Omtrek "cC1"

Bij volwassenen is dit doorgaans 6 cm vanaf de pols




Omtrek "cD"

Bij een verlengde handschoen: omtrek meten op het dikste gedeelte aan de onderarm



Omtrek "cX"

Vingeromtrek ter hoogte van de basis en tussen de vingers meten
Let op: "cX"-duimomtrek wordt gemeten aan de basis van de duim, ter hoogte van het duimgewricht

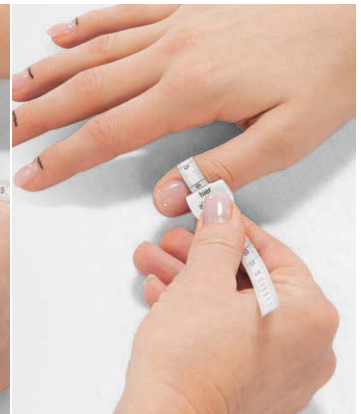


Omtrek "cZ"

Vingeromtrek ter hoogte van het gewenste einde van de vinger-aanzet. Bij gesloten vingers ter hoogte van de nagelriem

Lengtematen

- Lengtemaat loodrecht aan de binnenkant van de hand meten. De hand moet daarbij met uitgestrekte vingers op een stabiele ondergrond (bijv. tafel) liggen.

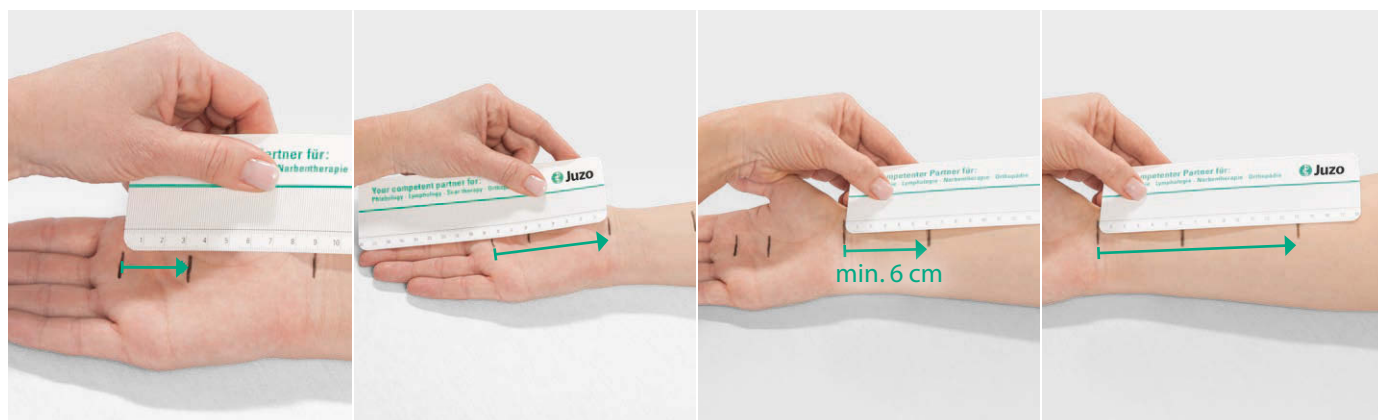

Lengte "PAB"

Vanaf de basis lijn tussen de implant van de wijsvinger en de pink tot het midden van de handpalm

Lengte "PAC"

Vanaf de implant van de pink tot aan de pols

Lengte "PCC1"

Vanaf de pols naar proximaal (bij volwassenen doorgaans 6 cm)

Lengte "PCD"

Voor een verlengde handschoen meet u tot aan het gewenste eindpunt van de bandage



Vingerlengten

Wij raden aan om de vingeraanzetten niet in een plooi van het vingergewricht te laten eindigen. Om een optimale pasvorm te krijgen, zijn vingers tot aan de nagelriem aan te bevelen.

Meet de vingerlengten vanaf "cX" tot aan de punt van de vinger of tot waar u de vinger wilt laten eindigen. De lengte van de 4de vinger moet worden gemeten tussen de 3de en 4de vinger.

Compressie hulpmiddelen

Armkousen



Algemene aanwijzingen

- Om een optimale pasvorm en drukverloop te krijgen adviseren wij een schuine boord.
- Wordt de armbandage in combinatie met een handschoen gedragen dan moet er minstens 6 cm overlap zijn.

Omtrekmaten

- Omtrekmaten altijd circulair en recht rond de arm meten. Niet in de huidplooiën meten.
- Bij restodeem kunt u het meetlint wat meer aantrekken indien gewenst.



Omtrek "cC"

Distaal van de pols



Omtrek "cC1"

Meestal op 6 cm afstand vanaf de pols



Omtrek "cD"

Op het dikste gedeelte van de onderarm



Omtrek "cE"

Van de elleboog tot in de elleboogplooi in een licht gebogen stand




Omtrek "cF"

Midden bovenarm



Omtrek "cG"

Ter hoogte van de okselholte

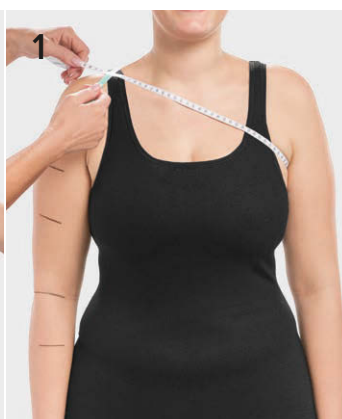

Omtrek "cHI"

Bij armkousen met schoudergordel: Omtrek vanuit meetpunt "H" onder de tegenoverliggende oksel door terug naar "H" meten (1)
 Alternatief: Omtrek onder de borst door meten (2)



Lengtematen

- Lengteomtrek loodrecht aan de binnenkant van de arm meten. De arm wordt gemeten in een ontspannen houding. De lengtemaat van de armkous wordt op "cC" gemeten, of bij een armaanzet op de gewenste lengte.




Lengte "PCC"

Vanaf de pols proximaal (meestal bij volwassenen is dit 6 cm vanaf de pols)



Lengte "PCD"

Vanaf de pols tot aan het dikste gedeelte van de onderarm

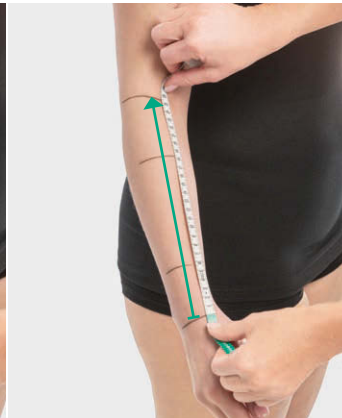

Lengte "PCE"

Vanaf de pols tot aan de binnenkant van de elleboogplooi




Lengte "PCF"

Vanaf de pols tot midden bovenarm



Lengte "PCG"

Vanaf de pols tot aan de oksel

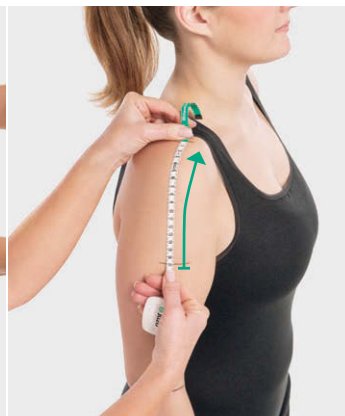

Lengte "PGH"

Bij armkousen met schoudergordel/bevestiging aan de BH: Lengte aan de buitenkant van de arm tegen het lichaam aan van de hoogte "cG" tot aan het meetpunt "H" (Acromion)



Lengte "PHH"

Bij armkousen met een bolerverbinding meet je van oksel tot oksel in een rechte lijn

Compressie hulpmiddelen

Thoraxbandages







Algemene aanwijzingen

- De lengtemaat altijd in een rechte hoek ten opzichte van de lengte-as (loodrecht) meten!
- Om optimale druk in de zone van de borst te bereiken, zijn armoanzetten (T-shirtvorm) of compressiearmkousen aan te bevelen. Bovendien moet er worden gezorgd voor een zo klein mogelijke halsopening.
- Handleiding voor het exact maatnemen van de armkousen of armoanzetten vindt u op pagina 15.







Omtrekmaten

- Omtrekmaten altijd circulair en recht meten. Niet in de huidplooien meten.
- Bij restoedeem eventueel onder spanning meten.

Thorax			
			
Omtrek "cN"	Omtrek "cT"	Omtrek "cK"	Omtrek "cH"
Borstomtrek onder de oksels gemeten	Tailleomtrek	Heupomtrek, bij een verlengde thoraxbandage minstens tot onder het heupbeen; bij body tot op schaambeenhoogte	Schouder omvang door de oksel plooi en over het acromion gemeten

Lengtematen

- Lengteomtrek loodrecht aan de binnenkant van de arm meten.
- Let op bij een afhangende schouder, meet de hoogste schouder.

Thorax		
		
Lengte "lTS"	Lengte "lKT"	Lengte "lQU"
Taille tot aan het midden van de schouders	Taille tot aan de heup (gewenst einde)	Breedte van de halsopening vooraan
		
Lengte "lRS"	Lengte "lKK1"	
Diepte van de halsopening vooraan	Bij thoraxbandage met bodybevestiging: vanaf de voorkant door het kruis tot aan de hoogte "cK" aan de achterkant meten	

Compressie hulpmiddelen

Hoofd-hals-bandage



Algemene aanwijzingen

- Houdt er rekening mee dat de openingen zo klein mogelijk moeten worden gehouden om de compressie van de bandage niet te verminderen. Door te grote openingen kan vensteroedeem ontstaan.
- Bij de uitvoering met een gesloten voorhoofd is ook het volledige achterhoofd gesloten. Bij de variant met een open voorhoofd is ook het achterhoofd ter hoogte van het voorhoofd open.

Omtrekmaten



Omtrek "cA"

Onderste halsomtrek parallel met omtrek "cB"



Omtrek "cB"

Halsomtrek direct onder de kin en aan het achterhoofd boven de eerste halswervel



Omtrek "cC"

Op de punt van de kin en tot aan het achterhoofd boven de eerste halswervel



Omtrek "cD"

Direct onder de onderlip en tot aan het achterhoofd boven de eerste halswervel



Omtrek "cE"


Op de wenkbrauwen en het achterhoofd



Omtrek "cE1"

Parallel aan de omtrek "cE" ter hoogte van waar het voorhoofd gaat teruglopen (meestal bij volwassenen 4 à 5 cm)

Lengtematen

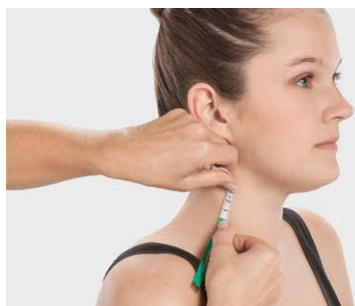

Lengte "PAB"

Hoogte van het halsgedeelte: Tussen "cB" en "cA" aan de buitenzijde van de hals. Daarbij mag de afstand niet te klein zijn, dit is om te vermijden dat het materiaal gaat rollen



Lengte "PBC"

Direct onder de kin tot aan de punt van de kin metern (contour volgen)



Lengte "PCD"

Van de punt van de kin tot onder de onderlip (contour volgen)



Lengte "PD'D1"

Hoofdband van punt "D1" boven het dikste gedeelte van het hoofd tot punt "D1" van de tegenoverliggende zijde



Lengte "PEE1"

Breedte van de voorhoofdsband: tussen "cE" en "cE1"



Lengte "PDE"

Positie van de voorhoofdsband: tussen "cD" en "cE"

Extra maten bij een gezichtsbandage

Breedtematen Loodrecht meten



Breedte "K"

Mondopening, van mondhoek tot mondhoek



Breedte "M"

Neusopening, horizontaal respectievelijk van binnenzijde tot binnenzijde van de neusvleugels



Breedte "M1"

Ingebreide neus: van neusvleugel tot neusvleugel losjes gemeten over de punt van de neus



Breedte "N"

Oogopening, van ooghoek tot ooghoek



Breedte "P"

Afstand tussen de ogen



Breedte "Oor"

Ooropening

Lengtematen Horizontaal meten



Lengte "M2"

Neuswortel tot punt van de neus



Lengte "S"

Bovenlip tot neus



Lengte "T"

Onder de onderlip tot aan het oog



Lengte "U"

Hoogte van de oogopening



Hoogte "Oor"

Ooropening

Juzo Klantenservice

NL · Tel. 08000 22 27 86 · Fax 08000 23 51 78 · order@juzo.nl · www.juzo.nl

BE · Tel. 0800 14 041 · Fax 0800 18 085 · order@juzo.be · www.juzo.be

Juzo Benelux BV · Moleneind 81 · 1241 NK Kortenhoef · Nederland · info@juzo.nl · www.juzo.nl · www.juzo.be

Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Duitsland · www.juzo.com

NLD - 14132500/4/6 - 8804LY - 10/2019
Wijzigingen en fouten voorbehouden.

